

1. Založte kleště na cervix (horizontálně nebo vertikálně, jak jste zvyklí u svých pacientek).



2. Uchopte kleště mezi ukazovák a prostředník jako na obrázku tak, aby Váš palec zůstal volný. Nasondujte uterus sondou přiloženou v balení.




3. Uchopte pevně palcem a ukazovákem oba díly aplikátoru společně jako na obrázku. Nenastavujte délku sondy na aplikátoru.




4. Zasuňte aplikátor do dělohy dokud neucítíte, že se dotkl fundu.



5. Okamžitě po kontaktu s fundem přidrže aplikátor volným palcem ruky ve které držíte kleště.

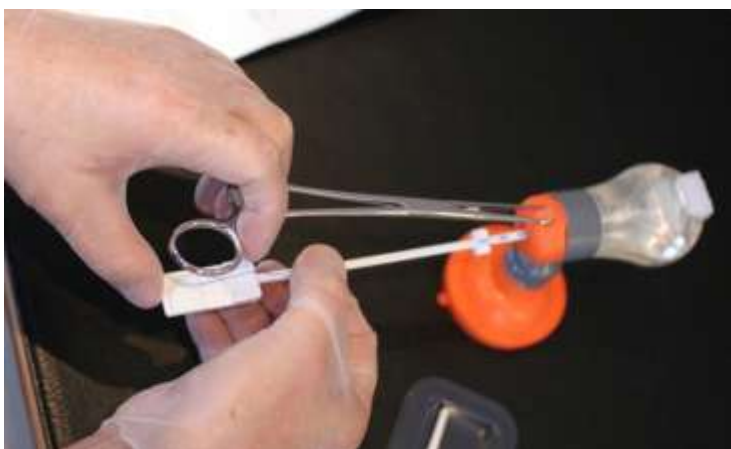

6. Nyní teprve můžete pustit sevření palce a ukazováku a těmito dvěma prsty přehmátněte na žebrované místo držátka zavaděče. Zaměřte svou pozornost na vzdálenost mezi držátkem a trubičkou zavaděče (v kroužku).

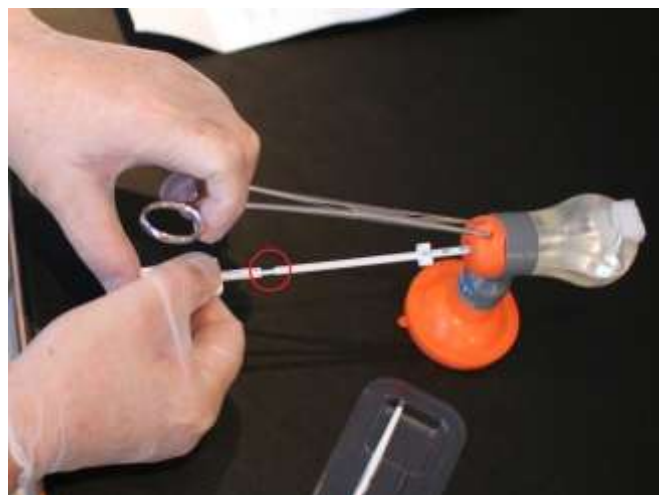


7. Tlačte držátko zavaděče dopředu dokud neucítíte jak uzlík vniká do fundu. Přestaňte tlačit v okamžiku, kdy se držátko zavaděče dotkne trubičky zavaděče a sledujte, zda se pružením nevrací a mezera zůstává uzavřena.



8. Držte Váš palec stále na konci držátka, abyste zamezili zpětnému tahu za vlasec a vytažení uzlíku. Při reálném zavedení přerízněte vlasec skalpelem. (Při trénování zavedení s pomocí HUT® vlasec uvolněte z držátka).



9. Uvolněte palec z držátka a vytáhněte bez rotace vnitřní část zavaděče.

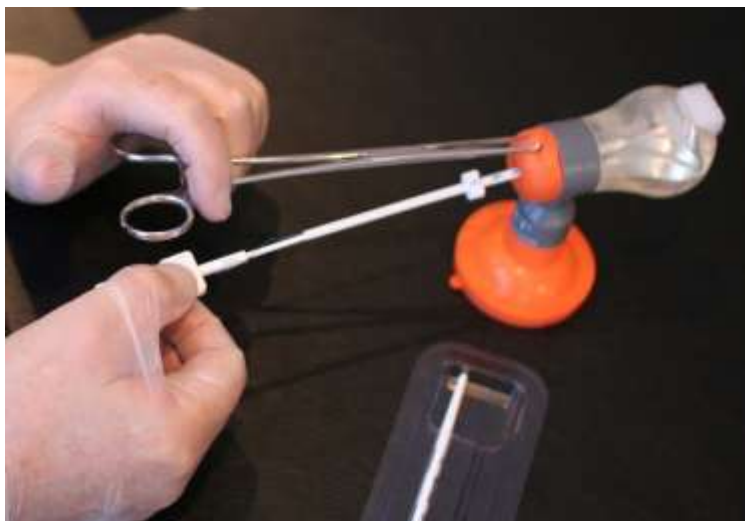

10. Vytáhněte s pomocí mírné rotace vnější část (trubičku) zavaděče



11. „Pohladte“ vlasec, abyste se ujistili, že je GyneFix® správně zaveden

